

PelviAir Unit

Exercitador muscular
para o assoalho pélvico



**AVALIAÇÃO E
MONITORAMENTO
DE EXERCÍCIOS DO
ASSOALHO PÉLVICO**

**SONDA ANAL
E VAGINAL**

DESIGN ANATÔMICO

FÁCIL DE USAR

PelviAir Unit

O **PelviAir Unit** é uma solução para biofeedback da contração muscular do assoalho pélvico que utiliza como unidade de medida a variação de pressão provocada durante os exercícios.

É uma forma simples e eficiente de ensinar ao paciente a intensidade de contração esperada durante o tratamento.

Se você busca um produto para iniciar no mundo do biofeedback para assoalho pélvico com um ótimo custo/benefício esta é a solução ideal.

Sonda vaginal




Sonda anal



A utilização é simples, o sistema é constituído por sondas manométricas (Vaginal ou Anal), mangueira para condução de ar e Manômetro analógico.

Com o **PelviAir Unit** o próprio paciente pode realizar exercícios de fortalecimento ou relaxamento. Todos os exercícios devem seguir orientação do profissional de saúde.

UTILIZANDO O PELVIAIR UNIT

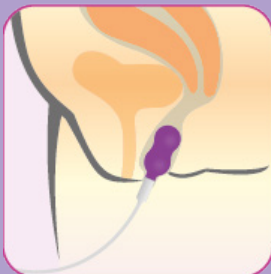

A sonda vaginal ou anal é recoberta por um preservativo lubrificado externamente e introduzida na cavidade do paciente.



A sonda é inflada lentamente até que o paciente sinta o contato contra a parede vaginal ou anal. É importante uma ligeira distensão desta parede.



Paciente e terapeuta monitoram parâmetros como: intensidade e tempo da contração/relaxamento melhorando a propriocepção.